



**SAFECARE BIO-TECH**

# SAFECARE COVID-19 Ag

## COVID-19 Antigen Rapid Test Device(Swab)

Rychlý test na detekci Antigenu Covid-19 je laterální imunotest určený ke kvalitativní detekci antigenu nukleokapsidového proteinu z přímých nosních výtěrů nebo ze vzorků odebraných výtěrů z nosohltanu u jedinců podezřelých z nákazy koronavirem Covid-19 během prvních sedmi dnů od nástupu příznaků.




### SAFECARE COVID-19 Ag Rapid test kit

Účel použití: Detekce antigenu SARS-CoV2  
Balení: 25 testů  
Skladování: 4-30 °C  
Typ vzorku: Výtěr z nosu  
Doba použitelnosti: 24 měsíců  
výsledek testu: 10-15 minut

## PŘÍPRAVA VZORKU A POSTUP ZKOUŠKY

### <Postup testu>

#### Příprava extrakčního roztoku

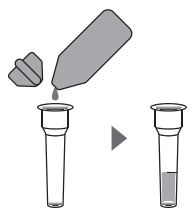


Do extrakční zkumavky vymáčkněte celý obsah kapsle




Před odběrem je nutné se důkladně vysmrkat


#### Odběr tamponem z nosu

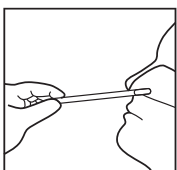


Odeberte vzorek od pacienta pomocí přiloženého výtěrového tamponu

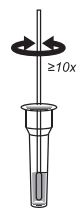


Promíchejte tampon s extrakčním roztokem

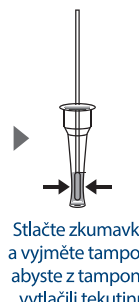

Stlačte zkumavku a vyjměte tampon, abyste z tamponu vytlačili tekutinu

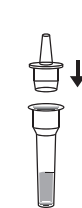


Nasadte víčko s kapátkem

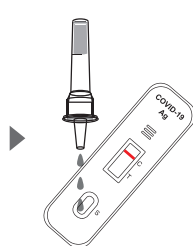

Kápněte 3 kapky vzorku do jamky na kazetě testu




10-15min

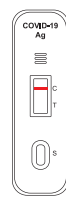


Odečtěte výsledek



## INTERPRETACE VÝSLEDKŮ

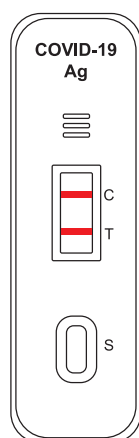


pozitivní

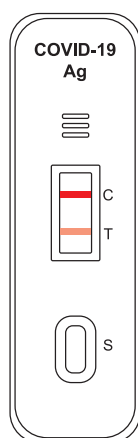

negativní

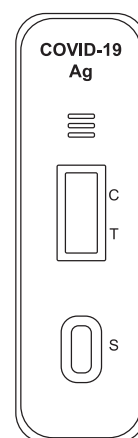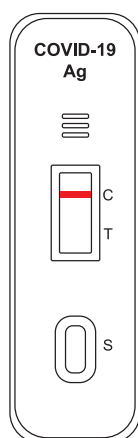

neplatný

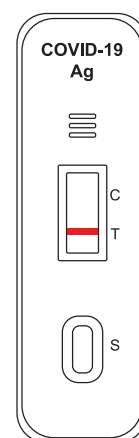

Výrobce: Safecare Biotech Co., Ltd